



ООО «Медтехника МОСКВА»
125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 3010181040000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

Руководство пользователя

Производитель: GUANGZHOU CITY GOLDRELAX CO., LTD
CHANGSHA ROAD, NO.20, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, CHINA

Номер партии: 012020080201-4/20



Тепло от камней проникает глубоко в мышцы и помогает снять с них напряжение. При чередовании горячих и холодных камней улучшается циркуляция крови, что помогает процессу самовосстановления организма. Таким образом, можно снять хроническую и ежедневную усталость приятным путем. Рекомендуется массаж камнями в сочетании с использованием эфирного масла и классического массажа. Можно снять следующие симптомы:

- Боль в мышцах, головную боль, растяжения
- Боль в спине
- Стресс, нервозность, бессонницу, беспокойства
- Жалобы, возникающие при артрите и ревматизме
- Фибромиалгия
- Депрессия

Противопоказания к использованию

1. При ослабленном организме (аутоиммунных патологиях/подавленности; заболеваниях нервной системы/головного мозга).
2. При использовании лекарств, которые могут вызывать побочные действия в результате повышения температуры тела.
3. Для пожилых людей или людей с тонкой чувствительной кожей; для маленьких детей; беременных; для людей недавно перенесших операции; людей с сердечными заболеваниями; заболеваниями нервной системы/невропатии; для людей с ослабленным организмом используйте среднюю температуру.

Применение

1. Перед использованием массажный терапевт должен просанировать камни и прогреть в ванночке с водой, температура которой от 120 до 150 градусов.
2. Вы ложитесь лицом вниз, когда терапевт делает Вам массаж спины. Сначала терапевт разогревает ваше тело путем классического массажа спины, а затем начинает массажировать вас нагретым камнем.
3. Когда используемый камень остывает, терапевт меняет камень. Терапевт использует для массажа разных зон



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 3010181040000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

камни разного размера и формы.

4. Терапевт также может оставлять камни в определенных точках вдоль позвоночника, в ваших ладонях, на животе, между пальцами ног для улучшения распределения потока энергии по вашему телу.

5. Многие терапевты считают, что сами камни излучают энергию и, поэтому для поддержания энергетического заряда в них, камни выкладывают в спиральный узор во время полнолуния.

Обслуживание и очистка

Необходимо проводить базовую санацию камней. Независимо от того, какой тип камней вы используете, после каждого использования необходимо вымыть камни в горячей воде с добавлением антибактериального моющего средства. После этого необходимо ополоснуть камни в теплой воде и высушить, разложив на полотенце. После этого камни необходимо сбрызнуть дезинфицирующим средством, содержащим спирт. Для мраморных камней используйте теплую воду, чтобы избежать повреждения камня.

Условия хранения

Храните камни в прохладном сухом месте.

Внимание!

1. Плотно закрывайте упаковку с камнями, если вы не собираетесь ими пользоваться.
2. Храните в недоступном месте от детей.
3. Когда камни нагрелись в подогревателе для массажных камней, не берите сразу их руками.
4. В случае ожога камнями, используйте воду или сухой лед. Если повреждение серьезное, обратитесь к врачу.
5. Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом!

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи; исключение составляют быстроизнашивающиеся детали и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г.

Печать, подпись продавца: