

УХОД ЗА ОБИВКОЙ

Ежедневная чистка: Теплым мыльным раствором удаляйте грязь и пыль с поверхности стола, и затем, вытирайте насухо мягкой, без ворса, тканью.

Дезинфекция: По мере необходимости дезинфицируйте стол изопропанолом, который используется в медицине в качестве дезинфицирующего очистителя.

Удаление пятен: Некоторые незначительные пятна можно удалить мягким неабразивным очистителем. Смочите влажной тряпкой с моющим средством, аккуратно протрите, чтобы удалить пятна, тщательно смойте теплой водой и насухо вытрите мягкой, без ворса, тканью.

Примечание: Никогда не используйте жесткие или абразивные чистящие средства, а также химические средства для очистки таблицы. Это может повредить обивку. Не используйте защитные средства, так как они могут повредить материал.

УХОД ЗА ДЕРЕВОМ

Ваш массажный стол сделан из древесины. При желании, вы можете местами отполировать ее качественным средством по уходу за деревом. Храните стол в сухости, избегайте контактов с мокрой или влажной средой. Если стол промокнет, быстро и тщательно протрите его насухо мягкой тканью.

«Casada» International GmbH
Obermayer Feld, 3
33104, Paderborn, Germany
Tel: (+49) (05254) 93098-0
Fax: (+49) (05254) 93098-30
info@casada.com
www.casada.com

Генеральный импортер в России:
ООО «Касада»
117042, Москва, ул. Академика Понрягина,
дом 21, корпус 1, помещение VII, Ком. 1
Тел: (495) 740 54 25
Эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право. Рисунки и тексты являются собственностью компании «КАСАДА Интернешнл ГмбХ» и могут использоваться только после получения прямого разрешения владельца.

Охраняется авторским правом (с) 2015 «КАСАДА» Интернешнл ГмбХ». Все права защищены.

Складной переносной массажный стол


health & beauty



Руководство пользователя

Для столов AL-3-16, AL-2-13, W-2-13

Двухсекционный портативный массажный стол из бука

Casada «W-2-13» - лучший выбор для массажистов, ценящих настоящее качество!

Складной 2-х секционный переносной массажный стол Casada «W-2-13» имеет прочную конструкцию из натурального дерева (бука) благодаря этому вес стола существенно облегчен и составляет всего 13 кг. Подходит для многих видов массажа и косметических процедур. Стол компактен – его легко брать с собой для проведения комфортного сеанса массажа в любом удобном для Вас месте. Стол отделан высококачественным кожзаменителем, который легко содержать в чистоте, а скругленные углы краев стола исключают мелкие травмы. Имеет складную конструкцию. Удобен для хранения и транспортировки. В комплект входит сумка-чехол для переноски.

Стол «W-2-13» подходит для:

- массажа;
- акупунктуры;
- косметических процедур;
- лимфодренажа;
- рефлексотерапии;



Максимальная нагрузка	250 кг
Материал основания	Мощный каркас из прочного бука; Усиленная рама стола; Наполнитель - полиуретан.
Отделка	Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа; Округленные борта;
Габариты (без подголовника)	63*186 см
Конструкция	Двухсекционная эргономическая; Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от попадания между секциями во время складывания;
Регулирование высоты	61-83 см
Вес	13 кг
Дополнительные опции	Съемный подголовник; Сумка для транспортировки; Съемные подлокотники;


Установка массажного стола




1-1. Откройте, фиксирующие замки.




1-2. Положите массажный стол боком и раскройте его.

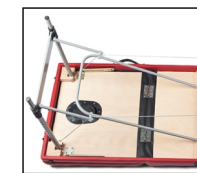

2. Разложите ножки (При раскрытии стола нижняя половина ножки занимает правильное положение).

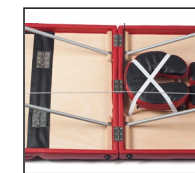

3. Зафиксируйте каждую распорку. Потянув их к краю стола.

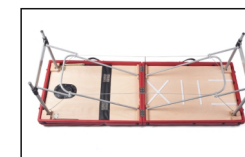

4. Поднимите стол и поставьте его ножками на пол.



5-1. Откройте подголовник.



5-2. Поместите направляющие подголовника в отверстия, положите на подголовник подушку



5-3. Вытащите ручку, отрегулируйте высоту и угол подголовника, а затем защелкните ручку обратно

3-х секционный массажный стол

Изменение высоты третьей секции.



Расстегните замок на торце стола и поднимите секцию на нужную высоту.



Чтобы сложить секцию, поднимите ее на максимальную высоту, затем опустите вниз, застегните замок

Трехсекционный портативный массажный стол из трубчатых рам

Casada «AL-3-16» – удлиненный массажный стол на алюминиевом каркасе!

Представляем вашему вниманию трёхсекционный складной массажный стол — Casada AL-3-16, предназначенный, как для проведения стационарных процедур, так и для выезда к клиентам. Легкое складывание данной модели и наличие удобной сумки в комплекте облегчат её транспортировку.

Стол изготовлен из высококачественных материалов. Усиленная подвеска делает его еще более устойчивым и надежным, а наличие в комплекте съемных подлокотников, подголовника, полочки для рук, а также отверстия для лица с заглушкой и регулируемого модуля позволяют проводить на нем различные массажные и косметологические процедуры. Стол регулируется по высоте, создавая для пользователя дополнительные удобства во время работы.




Стол «AL-3-16» подходит для:

- всех видов массажа;
- акупунктурного массажа;
- мануальной терапии;
- SPA-процедур;
- лимфодренажа;
- рефлексотерапии

Максимальная нагрузка	300 кг
Материал основания	Высокопрочная стальная подвеска из трубчатых рам; Усиленная рама стола; Эластичный газонаполненный пластик на основе полиуретана;
Отделка	Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа; Скругленные борта;
Габариты (без подголовника)	71*196 см
Конструкция	Трёхсекционная эргономическая; Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от попадания между секциями во время складывания.
Регулирование высоты	61-81 см
Вес	16 кг
Дополнительные опции	Съемный подголовник; Сумка для транспортировки; Съемные подлокотники;

Названия элементов массажного стола

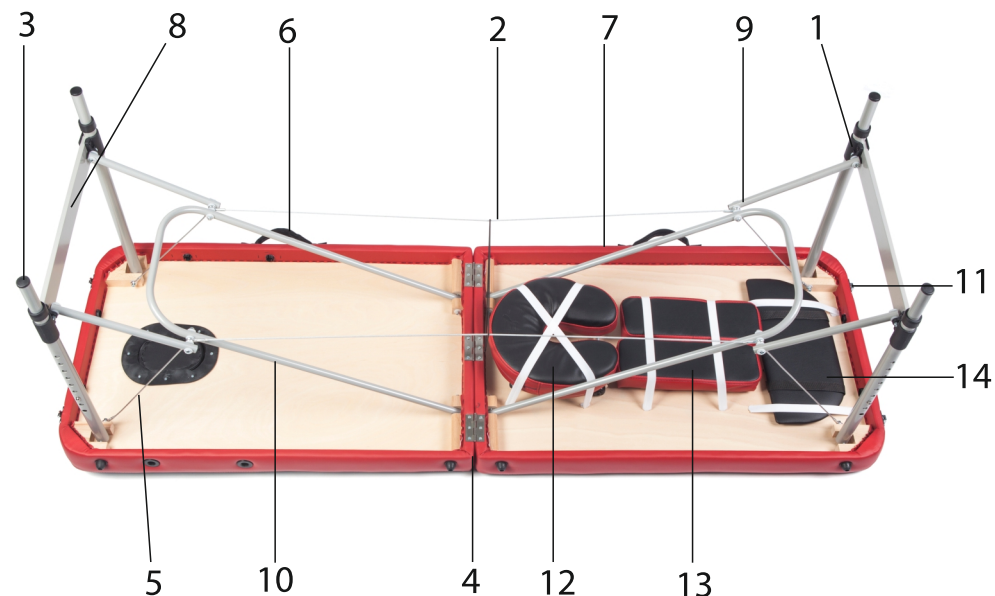

Номер	Описание	Количество
1	Ножка стола	4
2	Длинный трос	2
3	Защитная заглушка	4
4	Соединительная петля	3
5	Короткий трос	4
6	Ручка для переноски	1
7	Обивка	2
8	Распорка	2
9	Распорка	4
10	Распорка	4
11	Скоба замка	2
12	Подголовник	1
13	Подлокотник	2
14	Полочка для рук	1

Меры предосторожности

1. При сборке убедитесь, что все винты зафиксированы, и фиксирующий трос не порван и не изношен. Убедитесь, что нет трещин на алюминиевой структуре.
2. Не перегружайте стол за пределы рекомендованного веса пользователя. Это может привести к серьезной травме пользователя. Данный продукт протестирован при максимальной рабочей нагрузке 250 кг.
3. Не используйте чистящие средства, на основе спирта при чистке обивки стола. Это может привести к повреждению обивки. Используйте теплую мыльную воду и вытрите насухо.
4. Убедитесь, что при использовании стола все четыре ножки находятся на одном уровне. Использование ножек на разных уровнях может привести к неустойчивости стола и к травме.
5. Не позволяйте детям без присмотра взрослых собирать или разбирать массажный стол.
6. Будьте осторожны при использовании острых предметов, поскольку они могут повредить покрытие.

Сборка и транспортировка



1. Поставьте стол на бок, откройте замки, частично раскройте стол и выньте аксессуары
2. Стоя сзади стола, возьмитесь за ручки для переноса и аккуратно разверните стол, чтобы он полностью открылся. Разверните ножки стола.
3. Поставьте стол на ножки, держа стол посередине. Нажмите на середину стола и убедитесь, что стол принял горизонтальное положение.

Двухсекционный портативный массажный стол из трубчатых рам

Casada «AL-2-13» – легко собираемый алюминиевый массажный складной стол
Облегченный переносной массажный стол Casada «AL-2-13» позволяет проводить самые сложные массажные процедуры, без проблем выдерживая вес клиента и давление массажиста до 250 кг.
В комплект входит сумка-чехол для транспортировки и хранения стола, съемный регулируемый подголовник с полкой для рук и отверстие для лица в ложе с заглушкой.



Стол «AL-2-13» подходит для:

- массажа;
- мануальной терапии;
- SPA-процедур;
- лимфодренажа;
- рефлексотерапии

Максимальная нагрузка	250кг
Материал основания	Высокопрочная стальная подвеска из трубчатых рам; Прочный деревянный каркас; Эластичный газонаполненный пластик на основе полиуретана;
Отделка	Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа; Округленные борта;
Габариты (без подголовника)	60*185 см
Конструкция	Двухсекционная эргономическая; Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от попадания между секциями во время складывания;
Регулирование высоты	59-80 см
Вес	13 кг
Дополнительные опции	Съемный подголовник; Сумка для транспортировки; Съемные подлокотники;